

Y connector使い分け

公益財団法人脳血管研究所 附属美原記念病院
赤路和則、冨尾亮介、吉田啓佑、高橋宏典
木幡一磨、堀越知、西佑治



Optimo8Fr用
OKAY II Super Short
長さ67mm 10Fr
止血valve付き
短く太いもの使用



黄コネ

CeruleanDD6用
Peace3
長さ72mm 9Fr
止血valve付き
連結しやすい
短い太いもの使用
(OKAY II Short
80mmより短い)



青コネ

Microcatheter用
COPILOT
長さ76mm 7Fr
止血valve付き
細いもの使用



黒コネ

Balloon用
Abbott
長さ62mm 7Fr
止血valveなし
細いもの使用



白コネ

Balloon用以外では、血液漏れ防止のため、止血Valve付き使用
Microcatheter用では、Coil挿入しやすいように、細いもの使用

